

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号850

発生場所

-

精神・意識障害の有無

無

リスク

D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク

発生場所（その他）ベッドサイド

関連したもの

機器

発生内容の分類

落下物、その他

発生内容

酸素流量計の脱落による損傷

概要

看護師は、手術後の患者に酸素を投与するため、酸素流量計をアウトレットに接続して準備した。手術後、酸素投与量を設定するため、流量調整つまみを回したところ、酸素流量計がアウトレットから弾け飛び、ベッドに臥床している患者の右眉付近に落下し皮膚を損傷した。

要因

酸素流量計をアウトレットに接続した際、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込み、外れないことを確認することが不十分であった。アウトレット側の点検は行われていたが、酸素流量計の日常的な保守点検が十分に実施されていなかった。経年劣化などにより外れやすくなっていた可能性がある。

対策

酸素流量計をアウトレットに接続する際は、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込み、外れないことを確認する。耐用年数を超過した酸素流量計については、点検を行い、買い替えを行う。

参照